


ハミングマス G3 | クイックスタートガイド



本体に電源コードを接続し、マスクをベースユニットに接続します。

1. 電源入力プラグ
2. マスク接続用プラグ
3. オプションのセカンドマスク用プラグ

- 1- 電源 On/Off ボタン.
- 2- プログラム選択ボタン (1,2,3, or スリープモード)

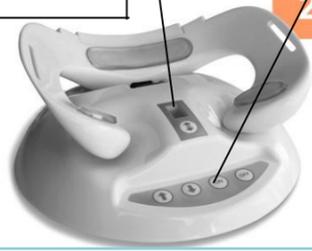

矢印↑ : 高輝度
矢印↓ : 低強度
ON = プログラムの開始
OFF = プログラムの終了

プログラム 1: 22 分 セッション (3 分毎に一時停止)
プログラム 2: 44 分 セッション (3 分毎に一時停止)
プログラム 3: 66 分 セッション (3 分毎に一時停止)
睡眠プログラム "S": 所要時間 16 分。
6 分間 2 回のセッション (短時間の休憩)



マスクのより快適な鼻骨への装着の為に 3 つのサイズがご
ざいます。

シリコンフェイスパッド :
ソフトフォームパッド(付属)に交換
することができます。



写真に示すように、付属のトラップを U 字型のシャックルに取り付けま
す。しっかりマスクをお顔に固定するために、ストラップを取り付けま
す。ストラップは、お顔の過度な圧迫につながる可能性があるため、締
めすぎないでください。

製品の保証と弊社よりのサービス・サポートをご利用戴く為に、ウェブサイトからご利用機種をご登録ください。

Web サイトから取扱説明書をダウンロードしてください。 www.thehummingmask.org/support



Model HM-G3